

Дерматовенерология

Нозология		Тип прибора «Биоптрон»	Методика применения	Примечание
1	Абсцесс, фурункулез период разрешения	«Б-коми»	4-6 мин. на проблемную зону кожи 1-3 раза в день. В. зазор 3-5 см. Курс 5 ежедневных процедур.	Обработка проблемных зон Окси — спреем до и после процедуры.
		«Б-про»	4-6 мин. на проблемную зону кожи 1-3 раза в день. В. зазор 10 см. Курс 5 ежедневных процедур.	
		«Б-2»	4-6 мин. на проблемную зону кожи 1-3 раза в день. В. зазор 15 см. Курс 5 ежедневных процедур.	
2	Угревая сыпь (акне все виды)	«Б-комп»	По 4 мин. на проблемные зоны кожи (2-4 поля). 1 раз в день. В. зазор 3-5 см. Курс 10 ежедневных процедур.	Обработка Окси — спреем проблемной зоны кожи до и после процедуры. Нанесение соответствующего крема для кожи в чередовании с маской или без нее 1 раз в день после процедуры.
		«Б-про»	По 4 мин. на проблемные зоны кожи (2 поля). 1 раз в день. В. зазор 10 см. Курс 10 ежедневных процедур.	
		«Б-2»	4- 8 мин. на область лица 1 раз в день. В. зазор 15 см. Курс 10 ежедневных процедур.	

Примечание:

«Б-комп» - прибор БИОПТРОН Компакт; «Б-про» - прибор БИОПТРОН Про;

«Б-2» - прибор БИОПТРОН 2; В. зазор - воздушный зазор.

5	Аллерго-дерматоз (кожная аллергия, зуд, покраснение кожи)	«Б-комп»	4 мин. на пораженные зоны кожи (2-4 поля) 3 раза в день. В. зазор 3-5 см. Курс 1-3 ежедневные процедуры.	Очистить поврежденный участок кожи мягким очищающим средством до процедуры. Обработка Окси - спреем до и после процедуры.
		«Б-про»	4 мин. на пораженные зоны кожи (2 поля) 3 раза в день. В. зазор 10 см. Курс 1-3 ежедневные процедуры.	
		«Б-2»	4-8 мин. на пораженную зону кожи 3 раза в день. В. зазор 15 см. Курс 1-3 ежедневные процедуры.	
6	Солнечная эритема (солнечный ожог)	«Б-комп»	По 4 мин. на проблемные зоны кожи (2-4 поля) 1-2 раза в день. В. зазор 3-5 см. Курс 1-2 ежедневные процедуры.	Обработка Окси - спреем проблемной зоны кожи до и после процедуры. Дополнительно нанести увлажняющий крем после процедуры.
		«Б-про»	По 4 мин. на проблемные зоны кожи (2 поля) 1-2 раза в день. В. зазор 10 см. Курс 1-2 ежедневные процедуры.	
		«Б-2»	4-8 мин. на проблемную зону кожи 1-2 раза в день. В. зазор 15 см. Курс 1-2 ежедневные процедуры.	

3	Крапивница острая, хроническая	«Б-комп»	По 2-4 мин. на зоны локализации высыпаний (2-4 поля) 1 раз в день. В. зазор 3 см. Курс 10 ежедневных процедур.	Обработка Окси - спреем зоны патологического очага перед процедурой.
		«Б-про»	По 2-4 мин. на зоны локализации высыпаний (2 поля) 1 раз в день. В. зазор 10 см. Курс 10 ежедневных процедур.	
		«Б-2»	4-6 мин. на зону локализации высыпаний 1 раз в день. В. зазор 15 см. Курс 10 ежедневных процедур.	
4	Атопический дерматит	«Б-комп»	По 2 мин. на проблемные зоны кожи (2-4 поля) 1-2 раза в день. В. зазор 3-5 см. Курс 20 ежедневных процедур.	Обработка Окси - спреем патологического очага перед процедурой. Повторный курс через 2-3 недели.
		«Б-про»	По 2 мин. на проблемные зоны кожи (2 поля) 1-2 раза в день. В. зазор 10 см. Курс 20 ежедневных процедур.	
		«Б-2»	4-6 мин. на проблемную зону кожи 1-2 раза в день. В. зазор 15 см. Курс 20 ежедневных процедур.	

9	Герпес опоясыва- ющий	«Б-комп»	По 2 мин. на пораженные зоны кожи (2-4 поля) 2 раза в день. В. зазор 3 см. Курс 10-12 ежедневных процедур.	Очистить поврежденный участок кожи мягким очищающим средством до процедуры. Обработка Окси - спреем пораженной зоны кожи до и после процедуры.
		«Б-про»	По 4 мин. на пораженные зоны кожи (2 поля) 2 раза в день. В. зазор 10 см. Курс 10-12 ежедневных процедур.	
		«Б-2»	4- 8 мин. на пораженную зону кожи 2 раза в день. В. зазор 15 см. Курс 10-12 ежедневных процедур.	
10	Герпес простой	«Б-комп»	По 2 мин. на проблемные зоны кожи (2-4 поля) 2 раза в день. В. зазор 3-5 см. Курс 10-12 ежедневных процедур.	Очистить поврежденный участок кожи мягким очищающим средством до процедуры. Обработка Окси - спреем проблемной зоны кожи до и после процедуры. Повторный курс через 2-3 недели - до 10 сеансов.
		«Б-про»	По 4 мин. на проблемные зоны кожи (2 поля) 2 раза в день. В. зазор 10 см. Курс 10-12 ежедневных процедур.	
		«Б-2»	8 мин. на проблемную зону кожи 2 раза в день. В. зазор 15 см. Курс 10-12 ежедневных процедур.	

7	Дерматит острый, хронический	«Б-комп»	По 2-4 мин. на пораженные зоны кожи (4-6 полей) 3 раза в день. В. зазор 3-5 см. Курс 12 ежедневных процедур.	<p>Очистить поврежденный участок кожи мягким очищающим средством до процедуры.</p> <p>Обработка Окси - спреем проблемной зоны кожи до и после процедуры.</p>
		«Б-про»	По 2-4 мин. на пораженные зоны кожи (2-4 поля) 3 раза в день. В. зазор 10 см. Курс 12 ежедневных процедур.	
		«Б-2»	4-8 мин. на пораженную зону кожи 3 раза в день. В. зазор 15 см. Курс 12 ежедневных процедур.	
8	Экзема острая, хроническая	«Б-комп»	По 4 мин. на проблемные зоны кожи (2-4 поля) 1-2 раза в день. В. зазор 3-5 см. Курс 7 ежедневных процедур.	<p>Обработка Окси – спреем проблемных зон кожи до и после процедуры.</p> <p>Соблюдать рекомендации врача по питанию.</p>
		«Б-про»	По 4 мин. на проблемные зоны кожи (2 поля) 1-2 раза в день. В. зазор 10 см. Курс 7 ежедневных процедур.	
		«Б-2»	4-8 мин. на проблемную зону кожи 1-2 раза в день. В. зазор 15 см. Курс 7 ежедневных процедур.	

11	Фолликулит различного происхождения	«Б-комп»	По 2 мин. на проблемные зоны кожи (2-4 поля) 1 раз в день. В. зазор 3-5 см. Курс 10-12 ежедневных процедур.	<p>Очистить проблемный участок кожи мягким очищающим средством до процедуры.</p> <p>Обработка Окси - спреем проблемной зоны кожи до и после процедуры.</p> <p>Повторный курс через 2-3 недели до 15 сеансов.</p>
		«Б-про»	4-6 мин. на проблемные зоны кожи (2 поля) 2 раза в день. В. зазор 10 см. Курс 20 ежедневных процедур.	
		«Б-2»	8-10 мин. на проблемные зоны кожи (2 поля) 2 раза в день В. зазор 15 см. Курс 20 ежедневных процедур.	
12	Себорейный дерматит (жирная, сухая, смешанная форма)	«Б-комп»	По 2 мин. на проблемные зоны кожи (2-4 поля) 1-2 раза в день. Курс 15 ежедневных процедур.	<p>Очистить поврежденный участок кожи головы мягким отшелушивающим средством до процедуры.</p> <p>Обработка Окси - спреем проблемной зоны кожи до и после процедуры.</p> <p>Повторный курс через 2-3 недели до 15 сеансов.</p>
		«Б-про»	По 4 мин. на проблемные зоны кожи (2 поля) 1 - 2 раза в день. В. зазор 10 см. Курс 15 ежедневных процедур.	
		«Б-2»	8-10 мин. на проблемную зону кожи 1 -2 раза в день. В. зазор 15 см. Курс 15 ежедневных процедур.	

13	Угри розовые (розецеа)	«Б-ко мн»	По 4 мин. на пораженные зоны кожи (2-4 поля) 1-2 раза в день. В. зазор 3-5 см. Курс 15 ежедневных процедур.	<p>Очистить поврежденный участок кожи мягким очищающим средством до процедуры.</p> <p>Обработка Окси – спреем проблемной зоны кожи до и после процедуры.</p> <p>Повторный курс через 2-3 недели до 15 сеансов.</p>
		«Б-про»	По 4 мин. на пораженные зоны кожи (2 поля) 1-2 раза в день. В. зазор 10 см. Курс 15 ежедневных процедур.	
		«Б-2»	4 мин. на пораженные зоны кожи 1 -2 раза в день. В. зазор 15 см. Курс 15 ежедневных процедур.	
14	Микоз кожный, ногтевой	«Б-комп»	По 4-6 мин. на пораженные зоны кожи и ногтевой пластины 2 раза в день. В. зазор 3-5 см. Курс до исчезновения признаков поражения.	<p>Ежедневное мытье ног.</p> <p>Туалет проблемной зоны 1% раствором метиленовой сини первые 3-4 дня 1 раз в день.</p>
		«Б-про»	4-6 мин. на пораженные зоны кожи и ногтевых пластин 2 раза в день. В. зазор 10 см. Курс до исчезновения признаков поражения.	
		«Б-2»	4-6 мин. на пораженные зоны кожи и ногтевых пластин 2 раза в день. В. зазор 15 см. Курс до исчезновения признаков поражения.	

15	Псориаз пустулезный	«Б-комл»	4 мин. на пораженные зоны кожи (2-4 поля) 2 раза в день. В. зазор 3-5 см. Курс 5-7 ежедневных процедур.	Очистить поврежденный участок кожи мягким очищающим средством до процедуры. Обработка Окси - спреем до и после процедуры.
		«Б-про»	По 4 мин. на пораженные зоны кожи (2 поля) 2 раза в день. В. зазор 10 см. Курс 5-7 ежедневных процедур.	
		«Б-2»	6-8 мин. на пораженные зоны кожи 2 раза в день. В. зазор 15 см. Курс 5-7 ежедневных процедур.	
16	Бородавки (шиловидные)	«К-коми»	4-6 мин. непосредственно на область бородавки 2 раза в день. В. зазор 3-5 см. Курс до исчезновения может длиться до 3-х месяцев.	Обязателен контроль врача- косметолога.
		«Б-про»	4-6 мин. непосредственно на область бородавки 2 раза в день. В. зазор 10 см. Курс до исчезновения может длиться до 3-х месяцев.	
		«Б-2»	4-6 мин. непосредственно на область бородавки 2 раза в день. В. зазор 15 см. Курс до исчезновения может длиться до 3-х месяцев.	

17	Келоидные рубцы (в сроки до 5 месяцев их образования)	«Б-комп»	4 мин. на проблемную зону кожи (2-4 поля) 2 раза в день. В. зазор 3-5 см. Курс 15 ежедневных процедур.	<p>Обработка Окси - спреем проблемной зоны до и после процедуры.</p> <p>Повторный курс- через 2-3 недели.</p>
		«Б-про»	По 4 мин. на проблемную зону (2 поля) 2 раза в день. В. зазор 10 см. Курс 15 ежедневных процедур.	
		«Б-2»	8-10 мин. на проблемную зону кожи 2 раза в день. В. зазор 15 см. Курс 15 ежедневных процедур.	
18	Аллопеция очаговая	«Б-комп»	6-8 мин. на проблемную зону кожи головы 1 раз в день. В. зазор 3-5 см. Курс 2-3 недели ежедневных процедур.	<p>Вымыть голову мягким шампунем, слегка подсушить.</p> <p>До процедуры массаж головы с использованием тоники.</p>
		«Б-про»	6-8 мин. на проблемную зону кожи головы 1 раз в день. В. зазор 10 см. Курс 2-3 недели ежедневных процедур.	
		«Б-2»	6-8 мин. на проблемную зону кожи головы 1 раз в день. В. зазор 15 см. Курс 2-3 недели ежедневных процедур.	

19	Ломкость ногтей	«Б-комп»	По 2-4 мин. на ногтевые пластинки (2-4 поля) 2 раза в день. 3 зазор 3-5 см. Курс 3-4 ежедневные процедуры.	Обработка Окси - спреем проблемных зон до и после процедуры.
		«Б-про»	По 4-8 мин. на ногтевые пластинки 2 раза в день. В зазор 10 см. Курс 3-4 ежедневные процедуры.	
		«Б-2»	6-8 мин. на ногтевые пластинки 2 раза в день. В зазор 15 см. Курс 3-4 ежедневные процедуры.	
20	Укусы насекомых	«Б-комп»	4 мин. на пораженные участки кожи 2 раза в день. В. зазор 3-5 см. Курс 1-2 ежедневные процедуры.	Обработка Окси - спреем проблемных зон до и после процедуры.
		«Б-про»	4 мин. на пораженные участки кожи 2 раза в день. В. зазор 10 см. Курс 1-2 ежедневные процедуры.	
		«Б-2»	4 мин. на пораженный участок кожи 2 раза в день. В. зазор 15 см. Курс 1 -2 ежедневные процедуры.	

Дерматотохирургия

21	Предоперационная подготовка хирургического лифтинга	«Б-комп»	По 2 мин. на проблемную зону кожи (2-4 поля) 1 раз в день. В. зазор 3-5 см. Курс 3-5 ежедневных процедур.	Обработка Окси - спреем проблемной зоны до и после процедуры. Повторный курс через 2-3 недели.
		«Б-про»	По 4 мин. на проблемную зону кожи (2 поля) 1 раз в день. В. зазор 10 см. Курс 3-5 ежедневных процедур.	
		«Б-2»	8 мин. на проблемную зону кожи 1 раз в день. В. зазор 15 см. Курс 3-5 ежедневных процедур.	
22	Реабилитационная программа после пластических операций	«Б-комп»	По 2 мин. на постоперационные зоны (4-6 полей) 1-2 раза в день. В. зазор 3-5 см. Курс 10 ежедневных процедур.	Облучение можно проводить на следующий день после операции
		«Б-про»	По 4 мин. на постоперационные зоны (2-4 поля) 1-2 раза в день. В. зазор 10 см. Курс 10 ежедневных процедур.	
		«Б-2»	По 8-10 мин. на постоперационные зоны 1-2 раза в день. В. зазор 15 см. Курс 10 ежедневных процедур.	

23	Реабилитационная программа после различных видов пилингов	«Б-комп»	По 2 мин. на проблемную зону кожи (2-4 поля) 1 -2 раза в день. В. зазор 3-5 см. Курс 10 ежедневных процедур.	<p>Обработка Окси - спреем проблемной зоны до и после процедуры.</p> <p>Повторный курс через 2-3 недели.</p>
		«Б-про»	По 4 мин. на проблемную зону кожи (2 поля) 1-2 раза в день. В. зазор 10 см. Курс 10 ежедневных процедур.	
		«Б-2»	8 мин. на проблемную зону кожи 1-2 раза в день. В. зазор 15 см. Курс 10 ежедневных процедур.	
24	Реабилитационная программа после перманентного макияжа губ и век	«Б-комп»	По 2 мин. на проблемные зоны (4-6 поля) 1- 2 раза в день. В. зазор 3-5 см. Курс 10 ежедневных процедур.	<p>Облучение можно проводить сразу же после процедуры.</p> <p>Обработка Окси - спреем проблемной зоны до и после процедуры.</p>
		«Б-про»	По 4 мин. на постоперационные зоны (2-4 поля) 1-2 раза в день. В. зазор 10 см. Курс 10 ежедневных процедур.	
		«Б-2»	8-10 мин. на постоперационные зоны 1-2 раза в день. В. зазор 15 см. Курс 10 ежедневных процедур.	

Эстетическая косметология

1	Традиционный ежедневный уход за кожей	«Б-комп»	По 2 мин. на зоны кожи лица (6-8 полей) 1-2 раза в день. В. зазор 3-5 см. Курс ежедневно.	<p>Обработка Окси - спреем проблемной зоны до и после процедуры.</p> <p>Повторный курс через 3 недели.</p>
		«Б-про»	По 4 мин. на зоны кожи лица (2 поля) 1-2 раза в день. В. зазор 10 см. Курс ежедневно.	
		«Б-2»	8 мин. на зону лица 1-2 раза в день. В. зазор 15 см. Курс ежедневно.	
2	Профилактика старения	«Б-комп»	По 2 мин. на места проявления морщин (4-6 полей) 1-2 раза в день. В. зазор 3-5 см. Курс 8-10 ежедневных процедур.	<p>Обработка Окси - спреем кожи до и после процедуры.</p> <p>Повторный курс через 3 недели.</p>
		«Б-про»	По 2 мин. на места проявления морщин (2-4 поля) 1-2 раза в день. В. зазор 10 см. Курс 8-10 ежедневных процедур.	
		«Б-2»	По 8-10 мин. на зону лица 1 - 2 раза в день. В. зазор 15 см. Курс 8-10 ежедневных процедур.	

3	Преждевременное старение кожи	«Б-комп»	По 2 мин. на места проявления морщин (4-6 полей) 1-3 раза в день. В. зазор 3-5 см. Курс ежедневно.	Обработка Окси - спреем кожи до и после процедуры.
		«Б-про»	По 2 мин. на места проявления морщин (2-4 поля) 1-3 раза в день. В. зазор 10 см. Курс ежедневно.	
		«Б-2»	По 8-10 мин. на зону лица 1 - 3 раза в день. В. зазор 15 см. Курс ежедневно.	
4	Морщины (мелкие и средние, носогубные складки, «гусиные лапки» и др.)	«Б-комп»	По 2 мин. на места проявления морщин (4-6 поля) 2- 3 раза в день. В. зазор 3-5 см. Курс 10 ежедневных процедур.	Обработка Окси - спреем кожи до и после процедуры. Повторный курс через 3 месяца
		«Б-про»	По 2 мин. на места проявления морщин (2-4 поля) 2- 3 раза в день. В. зазор 10 см. Курс 10 ежедневных процедур.	
		«Б-2»	По 8-10 мин. на зону лица 2- 3 раза в день. В. зазор 15 см. Курс 10 ежедневных процедур.	

5	Стрии	«Б-комп»	По 2 мин. на места проявления стрий (4-6 поля) 1-2 раза в день. В. зазор 3-5 см. Курс 15 ежедневных процедур.	Обработка Окси - спреем кожи до и после процедуры. Повторение курса через 2-3 недели.
		«Б-про»	По 2 мин. на места проявления стрий (2-4 поля) 1- 2 раза в день. В. зазор 10 см. Курс 15 ежедневных процедур.	
		«Б-2»	По 8-10 мин. на зону стрий 1 - 2 раза в день. В. зазор 15 см. Курс 15 ежедневных процедур.	




БИОПТРОН

**Сила света
для
здоровья
и
красоты**



Made in Switzerland



Отоларингология

Нозология		Тип прибора «Биоптрон»	Методика применения	Примечание
1	Ангина, тонзиллит	«Б-комп»	1) по 6 мин. непосредственно на область миндалин справа и слева в ротовой полости; 2) 6-8 мин. на область проекции тимуса (середина грудины) 2-3 раза в день. В. зазор 3-5 см. Курс 3-4 ежедневные процедуры (до исчезновения болей).	Обработка ротовой полости Окси - спреем до и после процедуры 2-3 раза в день с последующим его медленным проглатыванием.
		«Б-про»	1) по 6 мин. на область проекции миндалин справа и слева; 2) 6-8 мин. на область тимуса (середина грудины) 2-3 раза в день. В. зазор 10 см. Курс 3-4 ежедневные процедуры (до исчезновения болей).	
		«Б-2»	1) 6 мин. на область проекции миндалин справа и слева; 2) 6-8 мин на область проекции тимуса (середина грудины) 2-3 раза в день. В. зазор 15 см. Курс- 3-4 ежедневные процедуры (до исчезновения болей).	

2	Рино-ларингит	«Б-комп»	По 6 мин. на область проекции миндалин справа и слева 2-3 раза в день. В. зазор 3-5 см. Курс 2-3 ежедневные процедуры (до исчезновения хрипоты).	Обработка ротовой полости Окси-спреем до и после процедуры 2-3 раза в день с последующим его медленным проглатыванием.
		«Б-про»	По 6 мин. на область проекции миндалин справа и слева 2-3 раза в день. В. зазор 10 см. Курс 2-3 ежедневные процедуры (до исчезновения хрипоты).	
		«Б-2»	6 мин. на область проекции миндалин справа и слева 2-3 раза в день. В. зазор 15 см. Курс 2-3 ежедневные процедуры (до исчезновения хрипоты).	
3	Рино-фарингит (простудный, рефлексорный кашель)	«Б-комп»	1) по 2 мин. попеременно на боковые поверхности носа и непосредственно на область носогубного треугольника 2) по 6 мин. на область проекции миндалин справа и слева; 3) 6-8 мин. на зону проекции тимуса (середина грудины) 2- 3 раза в день. В. зазор 3-5 см. Курс 2-3 ежедневные процедуры (до исчезновения хрипоты).	Обработка ротовой полости Окси-спреем до и после процедуры 2-3кратно с последующим медленным его проглатыванием.
		«Б-про»	1) по 4-6 мин. непосредственно на область носа и носогубного треугольника; 2) 6 мин. на зону проекции миндалин справа и слева; 3) 6-8 мин. на зону проекции тимуса (середина грудины) 2 раза в день. В. зазор 10 см. Курс 2-3 ежедневные процедуры (до исчезновения хрипоты).	
		«Б-2»	1) по 4-6 мин. непосредственно на область носа и носогубного треугольника; 2) по 6 мин. на зону проекции миндалин справа и слева; 3) 6-8 мин. на зону проекции тимуса (середина грудины) 2-3 раза в день. В. зазор 15 см. Курс 2-3 ежедневные процедуры (до исчезновения хрипоты).	

4	Ринит острый, хронический.	«Б-комп»	1) по 2 мин. попеременно на боковые поверхности носа; 2) 2 мин. непосредственно на область носогубного треугольника 1- 2 раза в день. В. зазор 3-5 см. Курс 10 ежедневных процедур независимо от формы ринита.	Обработка Окси - спреем носоглотки до и после процедуры. Регулярный туалет носа.
		«Б-про»	4-6 мин. непосредственно на область носа и носогубного треугольника 1-2 раза в день. В. зазор 10 см. Курс 10 ежедневных процедур независимо от формы ринита.	
		«Б-2»	4-6 мин. на область лица 1-2 раза в день. В. зазор 15 см. Курс 10 ежедневных процедур независимо от формы ринита.	
5	Боли в ушах (оталгия)	«Б-комп»	6-8 мин. непосредственно на ушную раковину 2-3 раза в день. В. зазор 3-5 см. Курс 3 ежедневные процедуры.	При отсутствии положительного эффекта в течение 3 дней - обратиться повторно к ЛОР-врачу.
		«Б-про»	6-8 мин. непосредственно на ушную раковину 2-3 раза в день. В. зазор 10 см. Курс 3 ежедневные процедуры.	
		«Б-2»	6-8 мин. непосредственно на ушную раковину 2-3 раза в день. В. зазор 15 см. Курс 3 ежедневные процедуры.	

6	Ринит вазомоторный (поллиноз, аллергические синусопатии)	«Б-коми»	<p>1) по 2 мин. попеременно на боковые поверхности носа и носогубный треугольник;</p> <p>2) по 2 мин. попеременно на зоны проекции гайморовых и лобных пазух 1-2 раза в день;</p> <p>3) 4-6 мин. мин. на зону проекции тимуса (середина грудины) 1 раз в день. В. зазор 3-5 см. Курс 3-5 ежедневных процедур.</p>	<p>Обработка носоглотки Оксиспреем 2-3 раза в день с последующим медленным его проглатыванием.</p> <p>Для закрепления эффекта - продолжить до 10 дней.</p>
		«Б-про»	<p>1) по 4 мин. непосредственно на область носа, носогубный треугольник и зоны проекции гайморовых и лобных пазух 1-2 раза в день;</p> <p>2) 4-6 мин. на зону проекции тимуса (середина грудины) 1 раз в день. В. зазор 10 см. Курс 3-5 ежедневных процедур.</p>	
		«Б-2»	<p>1) 4-6 мин. на область лица;</p> <p>2) 4-6 мин. мин. на зону проекции тимуса (середина грудины) 1 раз в день. В. зазор 15 см. Курс 3-5 ежедневных процедур</p>	

7	Фронтит острый, хронический	«Б-комп»	1) по 4- 6 мин. попеременно на левую и правую половины Ба; 2) по 6 мин. на боковые поверхности носа 2-4 раза в день. В. зазор 3-5 см. Курс 4-5 ежедневных процедур.	Обработка носоглотки Окси-спреем 2-3 раза в день с последующим медленным его проглатыванием до и после процедуры.
		«Б-про»	4-6 мин. попеременно на левую и правую половины Ба и поверхность носа 2-4 раза в день. В. зазор 10 см. Курс 4-5 ежедневных процедур.	
		«Б-2»	4-6 мин. на область лица 2-4 раза в день. В. зазор 15 см. Курс 4-5 ежедневных процедур.	Регулярный туалет носа
8	Шум в ушах	«Б-комп»	6-8 мин. непосредственно на ушную раковину 2 раза в день. В. зазор 3-5 см. Курс индивидуальный.	Обработка носоглотки Окси-спреем около ушной области до и после процедуры. Массаж биологически активных точек заинтересованных меридианов.
		«Б-про»	6-8 мин. непосредственно на ушную раковину 2 раза в день. В. зазор 10 см. Курс индивидуальный.	
		«Б-2»	6-8 мин. непосредственно на ушную раковину 2 раза в день. В. зазор 15 см. Курс индивидуальный	

9	Наружный отит	«Б-комп»	6-8 мин. непосредственно на ушную раковину 2-3 раза в день. В. зазор 3-5 см. Курс 3-4 ежедневные процедуры.	Обработка носоглотки 2-3 раза в день с последующим медленным его проглатыванием и около ушной области до и после процедуры.
		«Б-про»	6 мин. непосредственно на ушную раковину 2-3 раза в день. В. зазор 10 см Курс 3-4 ежедневные процедуры.	
		«Б-2»	6 мин. непосредственно на ушную раковину 2-3 раза в день. В. зазор 15 см. Курс 3-4 ежедневные процедуры.	
10	Средний отит острый, хронический	«Б-комп»	1) 6 мин. непосредственно на ушную раковину; 2) 6 мин. на сосцевидный отросток; 3) 6 мин. на проекцию тимуса (середина грудины) 2 раза в день. В. зазор 3-5 см. Курс 6 ежедневных процедур.	Обработка Окси - спреем 2-3 раза в день с последующим медленным его проглатыванием до и после процедуры.
		«Б-про»	1) 6 мин. непосредственно на ушную раковину и на сосцевидный отросток; 2) 6 мин. на проекцию тимуса (середина грудины) 2 раза в день. В. зазор 10 см. Курс 6 ежедневных процедур.	
		«Б-2»	1) 6 мин. непосредственно на ушную раковину и сосцевидный отросток; 2) 6 мин. на проекцию тимуса (середина грудины) 2 раза в день. В. зазор 15 см. Курс 6 ежедневных процедур.	

11	Аденоиды	«Б-комп»	По 2-4 мин. попеременно на боковые поверхности области носа 2 раза в день. В. зазор 3-5 см. Курс 7 ежедневных процедур.	Обработка носоглотки Окси - спреем 2-3 раза в день с последующим медленным его проглатыванием до и после процедуры.
		«Б-про»	6 мин. на область носа 2 раза в день. В. зазор 10 см. Курс 7 ежедневных процедур.	
		«Б-2»	6 мин. на область лица 2 раза в день. В. зазор 15 см. Курс 7 ежедневных процедур.	
12	Гайморит острый, хронический	«Б-комп»	По 2-4 мин. на область проекции гайморовых пазух 2-3 раза в день. В. зазор 3-5 см. Курс 3 ежедневные процедуры.	Обработка носоглотки Окси - спреем 2-3 раза в день с последующим медленным его проглатыванием до и после процедуры. Регулярный врачебный туалет носовых ходов в процессе лечения.
		«Б-про»	По 4 мин. на область проекции гайморовых пазух 2-3 раза в день. В. зазор 10 см. Курс 3 ежедневные процедуры.	
		«Б-2»	4 мин. на область лица 2-3 раза в день. В. зазор 15 см. Курс 3 ежедневные процедуры	

13	Ларингит острый, хронический	«Б-комп»	<p>1) 4 мин. на область носогубного треугольника;</p> <p>2) 4 мин. на область проекции миндалин справа и слева 2 раза в день;</p> <p>3) 6 мин. на область проекции тимуса (середина грудины) 1 раз в день.</p> <p>В. зазор 3-5 см.</p> <p>Курс 6 ежедневных процедур.</p>	<p>Обработка носоглотки</p> <p>Окси - спреем 2-3 раза в день с последующим медленным его проглатыванием до и после процедуры.</p>
		«Б-про»	<p>1) 4 мин. на область носогубного треугольника;</p> <p>2) 4 мин. на область проекции миндалин справа и слева 2 раза в день;</p> <p>3) 6 мин. на область проекции тимуса (середина грудины) 1 раз в день.</p> <p>В. зазор 10 см.</p> <p>Курс 6 ежедневных процедур.</p>	
		«Б-2»	<p>1) 4-6 мин. на область носогубного треугольника и область шеи (проекция миндалин справа и слева) 2 раза в день;</p> <p>2) 6 мин. на область проекции тимуса (середина грудины) 1 раз в день.</p> <p>В. зазор 15 см.</p> <p>Курс 6 ежедневных процедур.</p>	

14	Папилломатоз гортани (после трахеостомии)	«Б-комп»	<p>1) 4 мин. на область носогубного треугольника;</p> <p>2) по 4 мин. на область проекции миндалин справа и слева.</p> <p>3) 6 мин. на область проекции тимуса (середина грудины) 1 раз в день.</p> <p>В. зазор 3-5 см.</p> <p>Курс 10 ежедневных процедур.</p>	<p>Обработка гортани</p> <p>Окси - спреем с последующим медленным его проглатыванием</p> <p>2-3 раза в день до и после процедуры.</p>
		«Б-про»	<p>1) 4 мин. на область носогубного треугольника;</p> <p>2) по 4 мин. на область проекции миндалин справа и слева;</p> <p>3) 6 мин. на область проекции тимуса (середина грудины) 1 раз в день.</p> <p>В. зазор 3-5 см.</p> <p>Курс 10 ежедневных процедур.</p>	
		«Б-2»	<p>1) 4-6 мин. на область носогубного треугольника и проекцию миндалин справа и слева);</p> <p>2) 6 мин. на область проекции тимуса (середина грудины) 1 раз в день.</p> <p>В. зазор 15 см.</p> <p>Курс 10 ежедневных процедур.</p>	

15	Диффузионные фурункулы	«Б-комп»	<p>1) 6-8 мин. непосредственно на точки воспаления в области слухового прохода;</p> <p>2) 4-6 мин. на зоны проекции подчелюстных лимфоузлов (справа или слева);</p> <p>3) 4-6 мин. на область сосцевидного отростка 3 раза в день.</p> <p>В. зазор-3-5 см.</p> <p>Курс 3-4 ежедневные процедуры.</p>	Обработка Окси - спреем области слухового прохода до и после процедуры.
		«Б-про»	<p>1) по 6-8 мин. непосредственно на область слухового прохода и зоны проекции подчелюстных лимфоузлов (справа или слева);</p> <p>2) 4-6 мин. на область сосцевидного отростка 3 раза в день.</p> <p>В. зазор 10 см.</p> <p>Курс 3-4 ежедневные процедуры.</p>	
		«Б-2»	<p>1) 6-8 мин. непосредственно на область слухового прохода и зоны проекции подчелюстных лимфоузлов (справа или слева);</p> <p>2) 4-6 мин. на область сосцевидного отростка 3 раза в день.</p> <p>В. зазор 15 см.</p> <p>Курс 3-4 ежедневные процедуры.</p>	

Терапия

Нозология		Тип прибора «Биоптрон»	Методика применения	Примечание
1	Гипертония	«Б-комп»	1) 4 мин. на зону проекции пульса на левой руке; 2) 4 мин. зона межбровья; 3) по 2 мин. на зону правого и левого виска. 4) 6 мин. зона затылка (по границе роста волос) 1-2 раза в день. В. зазор 5 см. Курс индивидуальный.	После процедуры наблюдается снижение показателей АД от исходного на 20 мм. рт.ст.
		«Б-про»	1) 4-6 мин. на зону проекции пульса левой руки; 2) 4 мин на зону межбровья. 3) по 2 мин. на зону правого и левого виска; 4) 6 мин на зону затылка (по границе роста волос) 1-2 раза в день. В. зазор 10 см. Курс индивидуальный.	
		«Б-2»	1) 4 мин. на зону проекции пульса левой руки; 2) 4 мин. на зону межбровья и правого и левого виска; 3) 6 мин. на зону затылка (по границе роста волос) 1-2 раза в день. В. зазор 15 см. Курс индивидуальный.	
2	Гипотония	«Б-комп»	4-6 мин. на область Ба (по границе роста волос) 1-2 раза в день. В. зазор 5 см. Курс индивидуальный.	Обработка Окси - спреем области лица до и после процедуры. После процедуры повышение показателей АД на 10-15 мм. рт. ст.
		«Б-про»	4-6 мин. на область Ба (по границе роста волос) 1-2 раза в день. В. зазор 10 см. Курс индивидуальный.	
		«Б-2»	4-6 мин. на область Ба (по границе роста волос) 1-2 раза в день. В. зазор 15 см. Курс индивидуальный.	

3	Бронхиальная астма	«Б-комп»	<p>1) 2 мин. на зону переносицы;</p> <p>2) по 2 мин. на боковые поверхности носа (2 поля);</p> <p>3) по 2 мин. на прикорневые зоны легких (паравертебрально)</p> <p>1 -2 раза в день;</p> <p>4) 6 мин. на зону солнечного сплетения</p> <p>1 раз в день.</p> <p>В. зазор 3-5 см.</p> <p>Курс 10-13 ежедневных процедур.</p>	<p>Обработка Окси - спреем области носоглотки до и после процедуры.</p> <p>Исключить облигатные продукты питания.</p>
		«Б-про»	<p>1) по 4 мин. на зону переносицы и боковые поверхности носа (2 поля);</p> <p>2) по 4 мин. на прикорневые зоны легких (паравертебрально)</p> <p>1-2 раза в день;</p> <p>3) 6 мин. на зону солнечного сплетения</p> <p>1 раз в день.</p> <p>В. зазор 10 см.</p> <p>Курс 10-13 ежедневных процедур.</p>	
		«Б-2»	<p>1) 4 мин. на зону переносицы и боковые поверхности носа;</p> <p>2) 6 мин. на прикорневую зону легких;</p> <p>3) 6 мин. на зону солнечного сплетения.</p> <p>В. зазор 15 см.</p> <p>Курс 10-13 ежедневных процедур.</p>	

4	Бронхит острый, хронический	«Б-комп»	<p>1) 2 мин. на зону носогубного треугольника 1 раз в день;</p> <p>2) по 4 мин. на прикорневую область легких 2-4 поля (паравертебрально) 4 раза в день;</p> <p>3) 6 мин. на зону проекции тимуса (середина грудины) 1 раз в день.</p> <p>В. зазор 3-5 см. Курс 7 ежедневных процедур.</p>	Обработка Окси - спреем области носоглотки до и после процедуры.
		«Б-про»	<p>1) 2 мин. на зону носогубного треугольника 1 раз в день;</p> <p>2) 4 мин. на прикорневую область легких 4 раза в день;</p> <p>3) 6 мин. на зону проекции тимуса (середина грудины) 1 раз в день.</p> <p>В. зазор 10 см. Курс 7 ежедневных процедур.</p>	
		«Б-2»	<p>1) 2 мин. на зону носогубного треугольника 1 раз в день;</p> <p>2) 4 мин. прикорневая область легких 4 раза в день;</p> <p>3) 2 мин. на зону проекции тимуса (середина грудины) 1 раз в день.</p> <p>В. зазор 15 см. Курс 7 ежедневных процедур.</p>	

5	Ревматоидный артрит плечевого сустава	«Б-комп»	1) по 2 мин. на болевые зоны плеча и надплечья (2-4 поля); 2) 2 мин. на область шейного отдела позвоночника (на уровне С3.7) 1 -2 раза в день. В. зазор 3-5 см. Курс 15-20 ежедневных процедур.	<p>Обработка Окси - спреем проблемной зоны до и после процедуры.</p> <p>Для достижения стабильных результатов повторить курс через 2-3 недели в течение 10 дней.</p>
		«Б-про»	1) 4-6 мин. на болевые зоны плеча и надплечья (2-4 поля); 2) 2 мин. на область шейного отдела позвоночника (на уровне С3.7) 1-2 раза в день. В. зазор 10 см. Курс 15-20 ежедневных процедур.	
		«Б-2»	1) 4-6 мин. на болевые зоны плеча и надплечья; 2) 2 мин. на область шейного отдела позвоночника (на уровне С 3.7) 1-2 раза в день. В. зазор 15 см. Курс 15-20 ежедневных процедур.	
6	Ревматоидный артрит средних суставов (локтевого, голеностопного, лучезапястного)	«Б-комп»	по 2 мин. на болевые точки (до 4 полей) 1-2 раза в день до 12 мин. В. зазор 3-5 см. Курс 15 ежедневных процедур.	<p>Повторный курс через 2-3 недели в течение 10 дней.</p>
		«Б-про»	4 мин. на болевые области (2-4 поля) 1 -2 раза в день. В. зазор 10 см. Курс 15 ежедневных процедур.	
		«Б-2»	4 мин. на болевые области (4 поля) 1 -2 раза в день. В. зазор 15 см. Курс 15 ежедневных процедур	

7	Ревматоидный артрит мелких суставов	«Б-комп»	По 2 мин. на болевые области (не менее 10 полей) 1-2 раза в день. В. зазор 3-5 см. Курс 15 ежедневных процедур.	<p>Обработка Окси - спреем облучаемых зон до и после процедуры.</p> <p>Повторный курс через 2-3 недели в течение 10 дней.</p>
		«Б-про»	8-10 мин. на зоны кистей (стоп) 1-2 раза в день. В. зазор 10 см. Курс 15 ежедневных процедур.	
		«Б-2»	8-10 мин. на зоны кистей (стоп) 1-2 раза в день. В. зазор 15 см. Курс 15 ежедневных процедур.	
8	Системная склеродермия, синдром Рейно, эозинофильный фасцит	«Б-комп»	1) 8-10 мин. на проблемные зоны кожи; 2) 2-4 мин. на проблемные зоны шейного и пояснично-крестцового отдела 2-4 поля (паравертебрально) 1-2 раза в день. В. зазор 3-5 см. Курс 15-20 ежедневных процедур.	<p>Обработка Окси - спреем облучаемых зон до и после процедуры.</p>
		«Б-про»	1) 8-10 мин. на проблемные зоны кожи; 2) 2-4 мин. на рефлексогенные зоны шейного и пояснично-крестцового отдела 1-2 раза в день. В. зазор 10 см. Курс 15-20 ежедневных процедур.	
		«Б-2»	1) 8-10 мин. на проблемные зоны кожи; 2) 2-4 мин. на рефлексогенные зоны шейного и пояснично-крестцового отдела 1-2 раза в день. В. зазор 15 см. Курс 15-20 ежедневных процедур.	

9	Деформирующий полиостеоартроз мелких суставов кисти и стопы	«Б-комп»	По 2 мин. на проблемные зоны кистей (стоп), не менее 10 полей 1-2 раза в день. В. зазор 3-5 см. Курс 15 ежедневных процедур.	<p>Обработка Окси - спреем проблемных зон до и после процедуры.</p> <p>Повторный курс через 2-3 недели в течение 10 дней.</p>
		«Б-про»	8-10 мин. на проблемные зоны кистей (стоп) 1 -2 раза в день. В. зазор 10 см. Курс 15 ежедневных процедур.	
		«Б-2»	8-10 мин. на проблемные зоны кистей (стоп). 1 -2 раза в день. В. зазор 15 см. Курс 15 ежедневных процедур.	
10	Остеохондроз пояснично-крестцовый	«Б-комп»	2 мин. на пояснично-крестцовую область (не менее 8 полей) 1-2 раза в день. В. зазор 3-5 см. Курс при остром процессе - не менее 5, хроническом 10 ежедневных процедур.	<p>Обработка Окси - спреем проблемной зоны до и после процедуры.</p> <p>Положение на боку, ноги притянуты к животу.</p>
		«Б-про»	16 мин. на пояснично-крестцовую область 1 -2 раза в день. В. зазор 10 см. Курс при остром процессе - не менее 5, хроническом 10 ежедневных процедур.	
		«Б-2»	16 мин. на пояснично-крестцовую область 1-2 раза в день. В. зазор 15 см. Курс при остром процессе - не менее 5, хроническом 10 ежедневных процедур.	

13	Язвенная болезнь	«Б-комп»	По 4 мин. на: 1) на зону проекции желудка и 12-перстной кишки; 2) на сегментарно-рефлекторную зону спины; 3) на зону проекции солнечного сплетения и тимуса. В. зазор 3-5 см. Курс 16-17 ежедневных процедур	Обработка Окси - спреем проблемной зоны до и после процедуры.
		«Б-про»	По 4 мин. на: 1) на зону проекции желудка и 12-перстной кишки; 2) на сегментарно-рефлекторную зону спины; 3) на зону проекции солнечного сплетения и тимуса. В. зазор 10 см. Курс 16-17 ежедневных процедур	
		«Б-2»	По 4 мин. на: 1) на зону проекции желудка и 12-перстной кишки; 2) на сегментарно-рефлекторную зону спины; 3) на зону проекции солнечного сплетения и тимуса. В. зазор 15 см. Курс 16-17 ежедневных процедур	
14	Пяточная "шпора	«Б-комп»	6 мин. непосредственно на пяточную кость 2 раза в день. В. зазор 3-5 см. Курс 6-8 ежедневных процедур.	Обработка Окси - спреем проблемной зоны до и после процедуры. Заказать у ортопеда стельки для обуви.
		«Б-про»	6 мин. непосредственно на пяточную кость 2 раза в день. В. зазор 10 см. Курс 6-8 ежедневных процедур.	
		«Б-2»	6 мин. непосредственно на пяточную кость 2 раза в день. В. зазор 15 см. Курс 6-8 ежедневных процедур.	

Урология

1	Простатит острый, хронический	«Б-комп»	6 мин. на середину промежности (под мошонкой) 2 раза в день. В. зазор 3-5 см. Курс 5 ежедневных процедур	Обработка Окси- спреем проблемной зоны до и после процедуры.
		«Б-про»	6 мин. на середину промежности (под мошонкой) 2 раза в день. В. зазор 10 см. Курс 5 ежедневных процедур.	
		«Б-2»	6 мин. на середину промежности (под мошонкой) 2 раза в день. В. зазор 15 см. Курс 5 ежедневных процедур.	
2	Баланопостит	«Б-комп»	По 6 мин. на зону проекции обоих яичек 2 раза в день. В. зазор 3-5 см. Курс 4-5 ежедневных процедур	Обработка Окси- спреем проблемной зоны до и после процедуры.
		«Б-про»	6 мин. на зону проекции обоих яичек 2 раза в день. В. зазор 10 см. Курс 4-5 ежедневных процедур.	
		«Б-2»	6 мин. на зону проекции обоих яичек 2 раза в день. В. зазор 15 см. Курс 4-5 ежедневных процедур.	

3	Аденома простаты	«Б-комп»	6 мин. на зону простаты (под мошонкой) 2 раза в день. В. зазор 3-5 см. Курс индивидуальный.	После предварительной консультации и под наблюдением уролога. Обработка Окси - спреем проблемной зоны до и после процедуры.
		«Б-про»	6 мин. на зону простаты (под мошонкой) 2 раза в день. В. зазор 10 см. Курс индивидуальный.	
		«Б-2»	6 мин. на зону простаты (под мошонкой) 2 раза в день. В. зазор 15 см. Курс индивидуальный.	
4	Импотенция	«Б-комп»	1) 6 мин. на зону простаты (под мошонкой); 2) 6 мин. на зону ромба Михаэлиса; 3) 6 мин. на зону солнечного сплетения 1-2 раза в день. В. зазор 3-5 см. Курс индивидуальный.	После предварительной консультации и под наблюдением уролога. Обработка Окси - спреем проблемной зоны до и после процедуры.
		«Б-про»	1) 6 мин. на зону простаты (под мошонкой); 2) 6 мин. на зону ромба Михаэлиса; 3) 6 мин. на зону солнечного сплетения 1-2 раза в день. В. зазор 10 см. Курс индивидуальный.	
		«Б-2»	1) 6 мин. на зону простаты (под мошонкой); 2) 6 мин. на зону ромба Михаэлиса; 3) 6 мин. на зону солнечного сплетения 1-2 раза в день. В. зазор 15 см. Курс индивидуальный.	

Неврология

15	Инсульт	«Б-коми»	<p>По 4-6 мин. на рефлекторно-сегментарные зоны позвоночника, сопряженные с парезом (2-4 поля) 2 раза в день. В. зазор 3-5 см. Курс 10-12 ежедневных процедур.</p>	<p>Обработка Окси-спреем проблемной зоны до и после процедуры.</p>
		«Б-про»	<p>По 4-6 мин. на рефлекторно-сегментарные зоны позвоночника, сопряженные с парезом (2-4 поля) 2 раза в день. В. зазор 10 см. Курс 10-12 ежедневных процедур.</p>	
		«Б-2»	<p>4-6 мин. на рефлекторно-сегментарные зоны позвоночника, сопряженные с парезом (2-4 поля) 2 раза в день. В. зазор 15 см. Курс 10-12 ежедневных процедур.</p>	



16	Обморок	«Б-комп»	6-8 мин. на зону проекции пульса на левой руке. В. зазор 3-5 см. Курс индивидуальный	Обработка Окси-спреем проблемной зоны до и после процедуры.
		«Б-про»	6-8 мин. на зону проекции пульса на левой руке. В. зазор 10 см. Курс индивидуальный	
		«Б-2»	6-8 мин. на зону проекции пульса на левой руке. В. зазор 15 см. Курс индивидуальный	
17	Депрессия	«Б-комп»	1) 2-4 мин на зоны закрытых глаз; 2) 6 мин. на зону проекции солнечного сплетения 1 раз в день. В. зазор 15-30 см. Курс 6-8 ежедневных процедур.	Обработка Окси-спреем проблемной зоны до и после процедуры.
		«Б-про»	1) 2-4 мин. на зоны закрытых глаз; 2) 6 мин. на зону проекции солнечного сплетения 1 раз в день. В. зазор 60 см. Курс 6-8 ежедневных процедур.	
		«Б-2»	1) 2-4 мин. на зоны закрытых глаз; 2) 6 мин. на зону проекции солнечного сплетения 1 раз в день. В. зазор 60 см. Курс 6-8 ежедневных процедур.	

18	Невралгия лицевого, тройничного нерва	«Б-комп»	2-4 мин. на зоны болевых точек (2-4 поля) 1-2 раза в день. В. зазор 3-5 см. Курс индивидуальный	Обработка Окси - спреем проблемной зоны до и после процедуры.
		«Б-про»	4-6 мин. на зоны болевых точек (2 поля) 1-2 раза в день. В. зазор 10 см. Курс индивидуальный	
		«Б-2»	6-8 мин. на проблемную зону лица 1-2 раза в день. В. зазор 15 см. Курс индивидуальный	
19	Головные боли	«Б-комп»	1) 2-4 мин на зону проекции пульса на левой руке; 2) 2-4 мин. на зону межбровья; 3) 2-4 мин. на зону виска 1 -2 раза в день. В. зазор 3-5 см. Курс 6-8 ежедневных процедур.	Головная боль исчезает через 10-15 минут (при необходи- мости повторить через 1 час). Обработка Окси - спреем проблемной зоны до и после процедуры.
		«Б-про»	1) 2-4 мин на зону проекции пульса на левой руке; 2) 2-4 мин. на зону межбровья и виска 1-2 раза в день В. зазор 10 см. Курс 6-8 ежедневных процедур.	
		«Б-2»	1) 2-4 мин на зону проекции пульса на левой руке; 2) 2-4 мин. на зону межбровья и виска 1-2 раза в день В. зазор 15 см. Курс 6-8 ежедневных процедур.	

20	Шейный остеохондроз, миозит	«Б-комп»	По 2-4 мин. на болевую зону(2-4 поля) 1-2 раза в день. В. зазор 3-5 см. Курс индивидуальный	Обработка Окси - спреем проблемной зоны до и после процедуры.
		«Б-про»	По 4 мин. на болевую зону (2 поля) 1-2 раза в день. В. зазор 10 см. Курс индивидуальный	
		«Б-2»	6-8 мин. на болевую зону 1-2 раза в день. В. зазор 15 см. Курс индивидуальный	
21	Лицевая симпаталгия (мигрень)	«Б-комп»	1) по 2 мин. на зоны Ба справа или слева; 2) 2 мин. на зону проекции виска; 3) на подглазничную область 1 -2 раза в день. В. зазор 3-5 см. Курс 7 ежедневных процедур.	Обработка Окси - спреем проблемной зоны до и после процедуры.
		«Б-про»	1) 4 мин. на зону Ба справа или слева, виска и подглазничную область 1 -2 раза в день. В. зазор 10 см. Курс 7 ежедневных процедур.	
		«Б-2»	1) 4-6 мин. на зону проблемной стороны Ба справа или слева, виска и подглазничной области 1 -2 раза в день. В. зазор 15 см. Курс 7 ежедневных процедур.	

22	Расстройство сна	«Б-комп»	2-4 мин. поточечно вдоль всех остистых позвонков (4-6 полей) перед сном. В. зазор 3-5 см. Курс 2-3 ежедневные процедуры.	Обработка Окси-спреем проблемной зоны до и после процедуры.
		«Б-про»	4 мин. вдоль остистых позвонков (4 поля) перед сном. В. зазор 10 см. Курс 2-3 ежедневные процедуры.	
		«Б-2»	6-8 мин. вдоль остистых позвонков (2 поля) перед сном. В. зазор 15 см. Курс 2-3 ежедневные процедуры.	
20	Ишиалгия	«Б-комп»	1) По 2-4 мин. на болевую зону (2-4 поля) пояснично-крестцовой области; 2) По 2-4 мин. на зоны иррадиации боли (2-4 поля) 1-2 раза в день. В. зазор 3-5 см. Курс 15-18 ежедневных процедур	Обработка Окси-спреем проблемной зоны до и после процедуры.
		«Б-про»	1) По 4 мин. на болевую зону (2 поля) пояснично-крестцовой области; 2) По 4 мин. на зоны иррадиации боли (2 поля) 1-2 раза в день. В. зазор 10 см. Курс 15-18 ежедневных процедур	
		«Б-2»	1) По 6-8 мин. на болевую зону пояснично-крестцовой области; 2) По 6-8 мин. на зону иррадиации боли (2 поля) 1-2 раза в день. В. зазор 15 см. Курс 15-18 ежедневных процедур	

23	Иммуно-дефицит	«Б-комп»	1) 2-4 мин. на зону проекции тимуса (середина грудины); 2) 2-4 мин. на зону проекции звездчатого узла; 3) 2-4 мин. на зону кистей (мягкий треугольник между первым и вторым пальцем) 1- 2 раза в день. В. зазор 3-5 см. Курс 10-12 ежедневных процедур.	Обработка Окси - спреем проблем- ной зоны до и после процедуры.
		«Б-про»	1) 2-4 мин. на зону проекции тимуса (середина грудины); 2) 2-4 мин. на зону проекции звездчатого узла; 3) 2-4 мин. на зону кистей (мягкий треугольник между первым и вторым пальцем) 1- 2 раза в день. В. зазор 10 см. Курс 10-12 ежедневн ых процедур.	
		«Б-2»	1) 2-4 мин. на зону проекции тимуса (середина грудины); 2) 2-4 мин. на зону проекции звездчатого узла; 3) 2-4 мин. на зону кистей (мягкий треугольник между первым и вторым пальцем) 1 - 2 раза в день. В. зазор 15 см. Курс 10-12 ежедневных процедур.	
18	Профилактика иммуно-дефицита	«Б-2»	8 мин. на поясничную область 2 раза в день. В. зазор 15 см. Курс 7-8 ежедневных процедур.	Обработка Окси - спреем проблем- ной зоны до и после процедуры.
18	Обще-укрепляющая методика	«Б-комп»	По 6 мин. на зоны подошв 1-2 раза в день. В. зазор 3-5 см. Курс индивидуальный.	Обработка Окси- спреем проблемной зоны до и после процедуры.
		«Б-про»	6 мин. на зону подошв 1-2 раза в день. В. зазор 10 см. Курс индивидуальный.	
		«Б-2»	6 мин. на зону подошв 1-2 раза в день. В. зазор 15 см. Курс индивидуальный.	

Педиатрия

Нозология		Тип прибора «Биоптрон»	Методика применения	Примечание
1	Атонический дерматит (нейродермит)	«Б-комп»	На очаги поражения кожи и рефлекторно-сегментарные зоны шейно-грудного отделов позвоночника (паравертебрально) 1-2 раза в день. В. зазор 3-5 см. Курс 8-12 ежедневных процедур.	<p>Обработка Окси - спреем проблемной зоны до и после процедуры.</p> <p>Суммарная экспозиция: до 3 лет- 2 мин. от 3-6 лет- 4-6 мин. от 6-10 лет- 6-8 мин. от 10-14 лет- 8-10 мин.</p>
		«Б-про»	На очаги поражения кожи и межлопаточную область 1-2 раза в день. В. зазор 10 см. Курс 8-12 ежедневных процедур.	
		«Б-2»	На очаги поражения кожи и межлопаточную область 1-2 раза в день. В. зазор 15 см. Курс 8-12 ежедневных процедур.	
2	Гормональный криз (набухание молочных желез)	«Б-комп»	2 мин. на каждую железу 3 раза в день. В. зазор-3-5 см. Курс 3 ежедневные процедуры.	<p>Обработка Окси - спреем проблемной зоны до и после процедуры.</p>
		«Б-про»	2 мин. на зону проекции желез 3 раза в день. В. зазор 10 см. Курс 3 ежедневные процедуры.	
		«Б-2»	2 мин. на зону проекции желез 3 раза в день. В. зазор 15 см. Курс 3 ежедневные процедуры.	

3	Бронхит острый, рецидивирующий, обструктивный	«Б-комп»	1) на область носогубного треугольника; 2) на межлопаточную область и заднебоковые поверхности грудной клетки (4 поля); 3) на область проекции тимуса (середина грудины) 1 раз в день. В.ззор 3-5 см. Курс 10-12 ежедневных процедур.	<p>Обработка Окси - спреем проблемной зоны до и после процедуры.</p> <p>Суммарная экспозиция: до 3 лет- 2 мин. от 3-6 лет- 4-6 мин. от 6-10 лет- 6-8 мин. от 10-14 лет- 8-10 мин.</p>
		«Б-про»	1) на область носогубного треугольника; 2) на межлопаточную область; 3) на область проекции тимуса (середина грудины) 1 раз в день. В. ззор 10 см. Курс 10-12 ежедневных процедур.	
		«Б-2»	1) на область носогубного треугольника; 2) межлопаточную область; 3) на область проекции тимуса (середина грудины) 1 раз в день. В. ззор-15 см. Курс 10-12 ежедневных процедур.	
4	Бронхиальная астма	«Б-комп»	На межлопаточную область паравертебрально 1 раз в день. В. ззор 3-5 см. Курс 10-12 ежедневных процедур.	<p>Обработка Окси - спреем проблемной зоны до и после процедуры.</p> <p>Суммарная экспозиция: до 3 лет- 2 мин. от 3-6 лет- 4-6 мин. от 6-10 лет- 6-8 мин. от 10-14 лет- 8-10 мин.</p>
		«Б-про»	На межлопаточную область 1 раз в день. В. ззор 10 см. Курс 10-12 ежедневных процедур.	
		«Б-2»	На межлопаточную область 1 раз в день. В. ззор 15 см. Курс 10-12 ежедневных процедур.	

5	Ожоговая болезнь	«Б-комп»	2-4 мин. на поле (1-4 поля) от 2 до 10 мин. в зависи- мости от возраста 2-4 раза в день. В. зазор 3-5 см. Курс 10-12 ежедневных процедур.	<p>Обработка Окси - спреем проблемной зоны до процедуры.</p> <p>Суммарная экспозиция: до 3 лет- 2 мин. от 3-6 лет- 4-6 мин. от 6-10 лет- 6-8 мин. от 10-14 лет- 8-10 мин.</p>
		«Б-про»	2-4 мин. на поле (1-4 поля) от 2 до 10 мин. в зависи- мости от возраста 2-4 раза в день. В. зазор 10 см. Курс-10-12 ежедневных процедур.	
		«Б-2»	2-4 мин. на поле от 2 до 10 мин. в зависимости от возраста 2-4 раза в день. В. зазор 15 см. Курс 10-12 ежедневных процедур.	
6	ОРВИс симпто- матикой ринита, рино- синусита	«Б-комп»	1) на пазухи и область носа; 2) на область проекции тимуса (середина грудины) 1 -2 раза в день В. зазор 3-5 см. Курс 8-10 ежедневных процедур.	<p>Обработка Окси - спреем проблемной зоны до и после процедуры.</p> <p>Суммарная экспозиция: до 3 лет- 2 мин. от 3-6 лет- 4-6 мин. от 6-10 лет- 6-8 мин. от 10-14 лет- 8-10 мин.</p>
		«Б-про»	1) на пазухи и область носа; 2) на область проекции тимуса (середина грудины) 1 -2 раза в день. В. зазор 10 см. Курс 8-10 ежедневных процедур.	
		«Б-2»	1) на пазухи и область носа; 2) на область проекции тимуса (середина грудины) 1-2 раза в день. В. зазор 3-5 см. Курс 8-10 ежедневных процедур.	

11	Нейрогенная дисфункция мочевого пузыря	«Б-комп»	На область проекции мочевого пузыря и крестцовую зону (паравертебрально) 1 раз в день. В.ззор 3-5 см. Курс 8-10 ежедневных процедур.	<p>Обработка Окси - спреем проблемной зоны до и после процедуры.</p> <p>Суммарная экспозиция: до 3 лет- 2 мин. от 3-6 лет- 4-6 мин. от 6-10 лет- 6-8 мин. от 10-14 лет- 8-10 мин.</p>
		«Б-про»	На область проекции мочевого пузыря и крестцовую зону 1 раз в день. В. ззор 10 см. Курс 8-10 ежедневных процедур.	
		«Б-2»	На область проекции мочевого пузыря и крестцовую зону 1 раз в день. В. ззор 15 см. Курс 8-10 ежедневных процедур.	
12	Профилактика ОРВИ	«Б-комп»	На носогубный треугольник и среднюю треть грудины 1 раз в день. В. ззор 3-5 см. Курс 8-10 ежедневных процедур.	<p>Обработка Окси - спреем проблемной зоны до и после процедуры.</p> <p>Суммарная экспозиция: до 3 лет- 2 мин. от 3-6 лет- 4-6 мин. от 6-10 лет- 6-8 мин. от 10-14 лет- 8-10 мин.</p>
		«Б-про»	На область носогубного треугольника и среднюю треть грудины 1 раз в день. В. ззор 10 см. Курс 8-10 ежедневных процедур.	
		«Б-2»	На область носогубного треугольника и среднюю треть грудины 1 раз в день. В. ззор 15 см. Курс 8-10 ежедневных процедур.	

13	Тонзиллит острый, хронический	«Б-комп»	На область проекции небных миндалин слева и справа, зев (с открытым ртом) 1-2 раза в день. В. зазор 3^5 см. Курс 8-10 ежедневных процедур.	<p>Обработка Окси — спреем проблемной зоны до и после процедуры.</p> <p>Суммарная экспозиция: до 3 лет- 2 мин. от 3-6 лет- 4-6 мин. от 6-10 лет- 6-8 мин. от 10-14 лет- 8-10 мин.</p>
		«Б-про»	На область проекции небных миндалин слева и справа, зев (с открытым ртом) 1 -2 раза в день. В. зазор 10 см. Курс 8-10 ежедневных процедур	
		«Б-2»	На область проекции небных миндалин слева и справа, зев (с открытым ртом) 1 -2 раза в день. В. зазор 15 см. Курс 8-10 ежедневных процедур	
14	Энцефалопатия ДДП	«Б-комп»	На сухожилия спазмированных мышц (аддукторы бедер, икроножные мышцы и др.). В. зазор 3-5 см. Курс индивидуальный.	<p>Обработка Окси - спреем проблемной зоны до и после процедуры.</p> <p>Суммарная экспозиция: до 3 лет- 2 мин. от 3-6 лет- 4-6 мин. от 6-10лет- 6-8 мин. от 10-14 лет- 8-10 мин.</p>
		«Б-про»	На сухожилия спазмированных мышц (аддукторы бедер, икроножные мышцы и др.). В. зазор 10 см. Курс индивидуальный	
		«Б-2»	На сухожилия спазмированных мышц (аддукторы бедер, икроножные мышцы и др.). В. зазор 15 см. Курс индивидуальный	

15	Гломеруло-нефрит острый, хронический	«Б-комп»	На зону проекции почек (паравертебрально) 1 раз в день. В. зазор 3-5 см. Курс 12 ежедневных процедур.	<p>Обработка Окси - спреем проблемной зоны до и после процедуры.</p> <p>Суммарная экспозиция: до 3 лет- 2 мин. от 3-6 лет- 4-6 мин. от 6-10 лет- 6-8 мин. от 10-14 лет- 8-10 мин.</p>
		«Б-про»	На зону проекции почек 1 раз в день. В. зазор 10 см. Курс 12 ежедневных процедур.	
		«Б-2»	На зону проекции почек 1 раз в день. В. зазор 15 см. Курс 12 ежедневных процедур.	

БИОПТРОН
для **ВСЕХ**
ПОКОЛЕНИЙ

Используйте свет будущего в комфортной обстановке Вашего дома каждый день.

Биоптрон - один прибор для всей семьи.

Made in Switzerland

BIOPTRON+

Хирургия

Нозология		Тип прибора «Биоптрон»	Методика применения	Примечания
1	Варикозное расширение вен	«Б-комп»	1) по 4-6 мин. непосредственно на зону варикозных узлов (2-4 поля); 2) 2-4 мин. на зону расширенных вен 1-2 раза в день. В. зазор 3-5 см. Курс 10-15 ежедневных процедур.	Обработка Окси - спреем проблемных зон до и после процедуры.
		«Б-про»	1) по 4-6 мин. непосредственно на зону варикозных узлов и расширенных вен (2 поля); 1-2 раза в день. В. зазор 10 см. Курс 10-15 ежедневных процедур.	
		«Б-2»	1) 4-6 мин. непосредственно на зону варикозных узлов и расширенных вен 1-2 раза в день. В. зазор 15 см. Курс 10-15 ежедневных процедур.	
2	Инфицированные мозоли	«Б-комп»	6 мин. на пораженные участки кожи 4 раза в день. В. зазор 3-5 см. Курс 5 ежедневных процедур.	Обработка Окси - спреем проблемных зон до и после процедуры.
		«Б-про»	6 мин. на пораженные участки кожи 4 раза в день. В. зазор 10 см. Курс 5 ежедневных процедур.	
		«Б-2»	6 мин. на пораженные участки кожи 4 раза в день. В. зазор 15 см. Курс 5 ежедневных процедур.	

3	Тромбо- флебит острый, хронический	«Б-комп»	1) 6 мин. на зону пояснично-крестцовой области; 2) 6 мин. по ходу измененных вен (4-6 поля) 2 раза в день. В. зазор 3-5 см. Курс 8-10 ежедневных процедур.	Обработка Окси - спреем проблемных зон до и после процедуры.
		«Б-про»	1) по 6 мин. на зону пояснично-крестцовой области 2-4 поля (паравертебрально); 2) 6 мин. по ходу измененных вен (2-4 поля) 2 раза в день. В. зазор 10 см. Курс 8-10 ежедневных процедур.	
		«Б-2»	1) 6 мин. пояснично- крестцовая область; 2) 6 мин. по ходу измененных вен 2 раза в день. В. зазор 15 см. Курс 8-10 ежедневных процедур.	
4	Трофические язвы (раны) голени	«Б-комп»	4-6 мин. непосредственно на пораженную поверхность кожи 1-2 раза в день. В. зазор 3-5 см. Курс 10-30 ежедневных процедур.	Очистить проблемную зону общепринятыми методами. Обработка Окси - спреем до и после процедуры. Если края раны будут заживать быстрее, чем ткань раны, следует сделать перерыв в лечении на 3-5 дней. В ходе лечения наблюдается период обострения.
		«Б-про»	4-6 мин. непосредственно на пораженную поверхность кожи 1-2 раза в день. В. зазор 10 см. Курс 10-30 ежедневных процедур.	
		«Б-2»	4-6 мин. непосредственно на пораженную поверхность кожи 1 -2 раза в день. В. зазор 15 см. Курс 10-30 ежедневных процедур.	

5	Трофические язвы (диабетические)	«Б-комп»	8 мин. на пораженный участок кожи 1-2 раза в день. В. зазор 3-5 см. Курс 7 ежедневных процедур.	<p>Очистить проблемную зону общепринятыми методами Обработка Окси - спреем до и после процедуры. В ходе лечения наблюдается период обос прения.</p>
		«Б-про»	8 мин. на пораженный участок кожи 1-2 раза в день. В. зазор 10 см. Курс 7 ежедневных процедур.	
		«Б-2»	8 мин. на пораженный участок кожи 1-2 раза в день. В. зазор 15 см. Курс 7 ежедневных процедур.	
6	Геморрой	«Б-комп»	6 мин. непосредственно на перианальную область 2 раза в день. В. зазор 3-5 см. Курс 5-6 ежедневных процедур.	<p>Предварительная гигиеническая процедура. Обработка Окси - спреем до и после процедуры. Регулярный туалет проблемной зоны. Профилактика запоров.</p>
		«Б-про»	6 мин. непосредственно на перианальную область 2 раза в день. В. зазор 10 см. Курс 5-6 ежедневных процедур.	
		«Б-2»	6 мин. непосредственно на перианальную область 2 раза в день. В. зазор 15 см. Курс 5-6 ежедневных процедур.	

7	Ушибы, травмы суставов с растяжением и разрывом связок	«Б-комп»	6-8 мин. непосредственно на травмированный участок 2 раза в день. В. зазор 3-5 см. Курс 2-6 ежедневных процедур.	<p>Обработка Окси - спреем проблемной зоны до и после процедуры.</p> <p>Период восстановления сокращается на 50%.</p>
		«Б-про»	4-6 мин. непосредственно на травмированный участок 2 раза в день. В. зазор 10 см. Курс 2-6 ежедневных процедур.	
		«Б-2»	6-8 мин. непосредственно на травмированный участок 2 раза в день. В. зазор 15 см. Курс 2-6 ежедневных процедур.	
8	Ссадины	«Б-комп»	4-6 мин. непосредственно на травмированную поверхность 2 раза в день. В. зазор 3-5 см. Курс 2 ежедневные процедуры.	<p>Обработать Окси - спреем проблемной зоны до и после процедуры.</p>
		«Б-про»	4-6 мин. непосредственно на травмированную поверхность 2 раза в день. В. зазор 10 см. Курс 2 ежедневные процедуры.	
		«Б-2»	4-6 мин. непосредственно на травмированную поверхность 2 раза в день. В. зазор 15 см. Курс 2 ежедневные процедуры.	

9	Мышечные судороги	«Б-комп»	6 мин. непосредственно на зону проблемной мышцы (2 поля) 2 раза в день. В. зазор 3-5 см. Курс индивидуальный.	Обработать Окси - спреем проблемной зоны до и после процедуры.
		«Б-про»	6 мин. непосредственно на зону проблемной мышцы 2 раза в день. В. зазор 10 см. Курс индивидуальный.	
		«Б-2»	6 мин. непосредственно на зону проблемной мышцы 2 раза в день. В. зазор 15 см. Курс индивидуальный.	
10	Рубцы	«Б-комп»	По 4 мин. поточечно в зависимости от размера рубца 2 раза в день. В. зазор 3-5 см. Курс индивидуальный.	Очистить рубец и прилегающие к нему ткани очищающим мягким средством до процедуры. Обработка Окси - спреем проблемной зоны до и после процедуры.
		«Б-про»	4 мин. на зону рубца 2 раза в день. В. зазор 10 см. Курс индивидуальный.	
		«Б-2»	4 мин. на зону рубца 2 раза в день. В. зазор 15 см. Курс индивидуальный.	

11	Диабетическая гангрена пальцев стопы (включая предоперационную подготовку)	«Б-комп»	6-8 мин. последовательно на всю поврежденную поверхность, особенно по границе со здоровой кожей 1-2 раза в день. В. зазор 3-5 см. Курс 8-10 ежедневных процедур.	Провести тщательный туалет поврежденной поверхности и прилегающей кожи общепринятыми методами. Обработка Окси - спреем проблемной зоны до и после процедуры.
		«Б-про»	6-8 мин. последовательно на всю поврежденную поверхность, особенно по границе со здоровой кожей 1-2 раза в день. В. зазор 10 см. Курс 8-10 ежедневных процедур.	
		«Б-2».	6-8 мин. на всю поврежденную поверхность особенно на границы со здоровой кожей 1 -2 раза в день. В. зазор 15 см. Курс 8-10 ежедневных процедур.	
12	, Раны	«Б-комп»	По 2- 4 мин. поточечно или на всю рану 1 -3 раза в день. В. зазор 3-5 см. Курс 9-10 ежедневных процедур.	Обработка Окси - спреем зоны раны до процедуры. Регулярные перевязки, избегая тугую иммобилизацию. Лечение гнойных ран показано только в стадии дегидратации.
		«Б-про»	4-6 мин. на всю рану 1 -3 раза в день. В. зазор 10 см. Курс 9-10 ежедневных процедур.	
		«Б-2»	4-6 мин. на всю рану 1 -3 раза в день. В. зазор 15 см. Курс 9-10 ежедневных процедур.	

13	Ожоги	«Б-комп»	4-6 мин. на всю поверхность ожога синим спектром в первые 2-4 дня, затем 4 мин. поляризованным чистым светом. В. зазор 3-5 см. Курс индивидуальный.	Обработка Окси - спреем ожоговой поверхности до процедуры. Регулярные перевязки, исключая тугую иммобилизацию.
		«Б-про»	4-6 мин. на проблемную зону. В. зазор 10 см. Курс индивидуальный.	
		«Б-2»	4-6 мин. на проблемную зону. В. зазор 15 см. Курс индивидуальный.	
14	Предоперационная подготовка (профилактика после операционных осложнений, нагноений, келоидных рубцов)	«Б-комп»	По 2-4 мин. на область предполагаемого операционного поля 1 раз в день. В. зазор 3-5 см. Курс 5 ежедневных процедур.	Обработка Окси - спреем облучаемой зоны до и после процедуры.
		«Б-про»	4-6 мин. на область предполагаемого операционного поля 1 раз в день. В. зазор 10 см. Курс 5 ежедневных процедур.	
		«Б-2»	4-6 мин. на область предполагаемого операционного поля 1 раз в день. В. зазор 15 см. Курс 5 ежедневных процедур.	

15	После- опера- ционные рубцы (свежие и келоидные)	«Б-комп»	По 4 мин. на зону рубца 1 раз в день. В. зазор 3-5 см. Курс 10-15 ежедневных процедур.	Лечение свежих рубцов можно начинать после наложения швов, келоидных с момента образования, курсом до 5 месяцев.
		«Б-про»	4-6 мин. на зону рубца 1 раз в день. В. зазор 10 см. Курс 10-15 ежедневных процедур.	
		«Б-2»	4-6 мин. на зону рубца 1 раз в день. В. зазор 15 см. Курс 10-15 ежедневных процедур.	
16	Инфиль- траты	«Б-комп»	6-8 мин. на проблемную зону 1 раз в день. В. зазор 3-5 см. Курс 5 ежедневных процедур.	Провести тщательный туалет поверхности инфильтрата общепринятым методом. Обработка Окси - спреем облучаемой зоны до и после процедур.
		«Б-про»	6-8 мин. на проблемную зону 1 раз в день. В. зазор 10 см. Курс 5 ежедневных процедур.	
		«Б-2»	6-8 мин. на проблемную зону 1 раз в день. В. зазор 15 см. Курс 5 ежедневных процедур.	

17	Гематома подкожная	«Б-комп»	2-4 мин. на патологический очаг 1-2 раза в день. В. зазор 3-5 см. Курс 5 ежедневных процедур.	Обработка Окси - спреем проблемной зоны до и после процедуры.
		«Б-про»	4 мин. на патологический очаг 1-2 раза в день. В. зазор 10 см. Курс 5 ежедневных процедур.	
		«Б-2»	4 мин. на патологический очаг 1-2 раза в день. В. зазор 15 см. Курс 5 ежедневных процедур.	
18	Пролежни	«Б-комп»	5 мин. на проблемную зону 1 раз в день. В. зазор 3-5 см. Курс 15 ежедневных процедур.	Обработать Окси — спреем проблемной зоны до и после процедуры.
		«Б-про»	5 мин. на проблемную зону 1 раз в день. В. зазор 10 см. Курс 15 ежедневных процедур.	
		«Б-2»	5 мин. на проблемную зону 1 раз в день. В. зазор 15 см. Курс 15 ежедневных процедур.	

19	Свищи	«Б-комп»	4 мин. на патологический очаг 3 раза в день. В. зазор 3-5 см. Курс 5 ежедневных процедур.	Обработка Окси - спреем проблемной зоны до и после процедуры.
		«Б-про»	4 мин. на патологический очаг 3 раза в день. В. зазор 10 см. Курс 5 ежедневных процедур.	
		«Б-2»	4 мин. на патологический очаг 3 раза в день. В. зазор 15 см. Курс 5 ежедневных процедур.	
20	Переломы	«Б-комп»	6-8 мин. на область свежего перелома (2-4 поля) 2 раза в день. В. зазор 3-5 см. Курс 5-7 ежедневных процедур.	Обработка Окси - спреем проблемной зоны до после процедуры. При иммобилизации места перелома облучение производить на здоровой стороне.
		«Б-про»	6-8 мин. на область свежего перелома 2 раза в день. В. зазор 10 см. Курс 5-7 ежедневных процедур.	
		«Б-2»	6-8 мин. на область свежего перелома 2 раза в день. В. зазор 15 см. Курс 5-7 ежедневных процедур.	

21	Бурсит острый, хронический	«Б-комп»	1) по 6 мин. на боковые поверхности области колена; 2) 6 мин. на область подколенной ямки 2-3 раза в день. В. зазор 3-5 см. Курс индивидуальный.	<p>Обработка Окси - спреем проблемной зоны до и после процедуры.</p> <p>Исключить большие нагрузки на коленные суставы.</p>
		«Б-про»	1) 6 мин. на область колена; 2) 6 мин. на область подколенной ямки 2-3 раза в день. В. зазор 10 см. Курс индивидуальный.	
		«Б-2»	1) 6 мин. на область колена; 2) 6 мин. на область подколенной ямки 2-3 раза в день. В. зазор 15 см. Курс индивидуальный.	
22	Растяжение связок коленного сустава	«Б-комп»	1) по 6 мин. на боковые области проекции суставной щели колена 2-3 раза в день; 2) 6 мин. на область подколенной ямки 2 раза в день. В. зазор 3-5 см. Курс индивидуальный.	<p>Обработка Окси - спреем проблемной зоны до и после процедуры.</p> <p>Наложить поддержива- ющую повязку после процедуры.</p>
		«Б-про»	1) по 6 мин. на область колена 2-3 раза в день; 2) 6 мин. на область подколенной ямки 2 раза в день. В. зазор 10 см. Курс индивидуальный.	
		«Б-2»	1) по 6 мин. на область колена 2-3 раза в день; 2) 6 мин. на область подколенной ямки 2 раза в день. В. зазор 15 см. Курс индивидуальный.	

23	Термоингаляционные травмы	«Б-комп»	<p>1) 6 мин. на переднебоковые поверхности шеи 2 раза в день; В. зазор 1см.</p> <p>2) 2 мин. на паравертебральные зоны позвоночника (на уровне С4.5; Th[^]; L3_4 и крестца); В. зазор 5 см.</p> <p>3) 6 мин. на зону проекции тимуса (середина грудины) 2-3 раза в день; В. зазор 3 см.</p> <p>4) 4 мин. на область затылка (по линии роста волос) 1-2 раза в день (при сильных головных болях). В. зазор 3 см.</p> <p>Курс индивидуальный.</p>	<p>Обработка Окси - спреем задней и передней области шеи до и после процедуры.</p>
		«Б-про»	<p>1) 6 мин. на переднебоковые поверхности шеи 2 раза в день;</p> <p>2) по 2 мин. на паравертебральные зоны позвоночника (на уровне с4.5; тпб_7; L3.4 и область крестца);</p> <p>3) 6 мин. на зону проекции тимуса (середина грудины) 2-3 раза в день;</p> <p>4) 4 мин. на область затылка (по линии роста волос) 1-2 раза в день (при сильных головных болях). В. зазор 10 см.</p> <p>Курс индивидуальный.</p>	
		«Б-2»	<p>1) 6 мин. на переднебоковые поверхности шеи 2 раза в день;</p> <p>2) по 2 мин. на паравертебральные зоны позвоночника (на уровне С±5; Th[^]; L3_4 и область крестца);</p> <p>3) 6 мин. на зону тимуса (середина грудины) 2-3 раза в день;</p> <p>4) 4 мин. на область затылка (по линии роста волос) 1-2 раза в день (при сильных головных болях). В. зазор- 15см.</p> <p>Курс индивидуальный.</p>	

Стоматология

Нозология		Тип прибора «Биоптрон»	Методика применения	Примечания
1	Альвеолит	«Б-комп»	4-6 мин. на патологический очаг (можно через щеку) 1-2 раза в день. В.ззор 3-5 см. Курс 3-4 ежедневные процедуры.	Обработка зоны патологического очага Окси - спреем до и после процедуры.
		«Б-про»	4-6 мин. на патологический очаг (можно через щеку) 1-2 раза в день. В.ззор 10 см. Курс 3-4 ежедневные процедуры.	
		«Б - 2»	4-6 мин. на патологический очаг (можно через щеку) 1-2 раза в день. В.ззор 15 см. Курс 3-4 ежедневные процедуры.	
2	Воспаление слюнных желез	«Б-комп»	6-8 мин. на патологический очаг (можно через щеку) 3 раза в день. В. ззор 3-5 см. Курс 3-4 ежедневные процедуры.	Обработка слизистой полости рта Окси - спреем до и после процедуры.
		«Б-про»	6-8 мин. на патологический очаг (можно через щеку) 3 раза в день. В. ззор 10 см. Курс 3-4 ежедневные процедуры.	
		«Б - 2»	6-8 мин. на патологический очаг (можно через щеку) 3 раза в день. В. ззор 15 см. Курс 3-4 ежедневные процедуры.	

3	Стоматит, гингивит острый, хронический	«Б-комп»	4 мин. на слизистую десен 2 раза в день. В. зазор 3-5 см Курс 3-5 ежедневных процедур.	Обработка слизистой полости рта Окси - спреем до и после процедуры.
		«Б-про»	4 мин. на проекцию слизистой десен (можно через щеку) 2 раза в день. В. зазор 10 см Курс 3-5 ежедневных процедур.	
		«Б-2»	4 мин. на проекцию слизистой десен (можно через щеку) 2 раза в день. В. зазор 15 см Курс 3-5 ежедневных процедур.	
4	Глоссалгия, глоссит	«Б-комп»	6-8 мин. на слизистую корня языка 3-раза в день. В. зазор 3-5 см. Курс 3-4 ежедневные процедуры.	Обработка слизистой полости рта Окси - спреем до и после процедуры.
		«Б-про»	6-8 мин. на нижнюю область лица и подбородка 3-раза в день. В. зазор 10 см. Курс 3-4 ежедневные процедуры.	
		«Б-2»	6-8 мин. на нижнюю область лица и подбородка 3-раза в день. В. зазор 15 см. Курс 3-4 ежедневные процедуры.	

5	Зубная боль	«Б-комп»	6-8 мин. на зону патологического очага (можно через щеку) однократно В. зазор 3-5 см. Затем лечение в стоматологическом кабинете.	Обработка зоны патологического очага Окси - спреем до и после процедуры.
		«Б-про»	6-8 мин. на зону патологического очага (можно через щеку) однократно. В. зазор 10 см. Затем лечение в стоматологическом кабинете.	
		«Б-2»	6-8 мин. на зону патологического очага (можно через щеку) однократно. В. зазор 15 см. Затем лечение в стоматологическом кабинете.	
6	Пародонтоз, пародонтит	«Б-комп»	4-5 мин. на слизистую десен (можно через щеку) 2 раза в день. В. зазор 3-5 см. Курс 10 ежедневных процедур.	Обработка слизистой полости рта Окси - спреем до и после процедуры.
		«Б-про»	4-5 мин. на проекцию слизистой десен (можно через щеку) 2 раза в день. В. зазор 10 см. Курс 10 ежедневных процедур.	
		«Б-2»	4-5 мин. на проекцию слизистой десен (можно через щеку) 2 раза в день. В. зазор 15 см. Курс 10 ежедневных процедур.	

7	Периодонтит острый, хронический	«Б-комп»	4-6 мин. на зону патологического очага 1-2 раза в день. В. зазор 3-5 см. Курс 3 ежедневные процедуры.	Облучение проводить после трепанации причинного зуба Обработка слизистой полости рта Окси - спреем до и после процедуры.
		«Б-про»	4-6 мин. на зону патологического очага (можно через щеку) 1 -2 раза в день. В. зазор 10 см. Курс 3 ежедневные процедуры.	
		«Б-2»	4-6 мин. на зону патологического очага (можно через щеку) 1 -2 раза в день. В. зазор 15 см. Курс 3 ежедневные процедуры.	
8	Периодонтит (мышьяковистый)	«Б-комп»	4-6 мин. на зону патологического очага (можно через щеку) 1-2 раза в день. В. зазор 3-5 см. Курс 3 ежедневные процедуры.	Облучение проводить после удаления мышьяка. Обработка зоны патологического очага Окси - спреем до и после процедуры.
		«Б-про»	4-6 мин. на зону патологического очага (можно через щеку) 1-2 раза в день. В. зазор 10 см. Курс 3 ежедневные процедуры.	
		«Б-2»	4-6 мин. на зону патологического очага (можно через щеку) 1-2 раза в день. В. зазор 15 см. Курс 3 ежедневные процедуры.	

Офтальмология

Нозология		Тип прибора «Биоптрон»	Методика применения	Примечания
1	Миопия	«Б-комп»	2-4 мин. на наружный угол глаза 2 раза в день. В. зазор 3-5 см. Курс 14 ежедневных процедур.	<p>Перед сеансом снять контактные линзы.</p> <p>После процедуры закапать назначенные врачом глазные капли.</p> <p>Обработка слизистой глаза Окси - спреем 3 раза в день.</p>
		«Б-про»	2-4 мин. на наружный угол глаза 2 раза в день. В. зазор 10 см. Курс 14 ежедневных процедур.	
		«Б-2»	2-4 мин. на область лица 2 раза в день. В. зазор 15 см. Курс 14 ежедневных процедур.	
2	Ячмень	«Б-комп»	6-8 мин. на патологический очаг 1-3 раза в день. В. зазор 3-5 см. Курс 3-5 ежедневных процедур.	<p>Перед сеансом снять контактные линзы.</p> <p>После процедуры закапать назначенные глазные капли.</p> <p>Обработка слизистой глаза Окси - спреем 3 раза в день.</p>
		«Б-про»	6-8 мин. на патологический очаг 1 - 3 раза в день, В. зазор 10 см. Курс 3-5 ежедневных процедур.	
		«Б-2»	6-8 мин. на область лица {проекцию патологического очага) 1-3 раза в день. В. зазор 15 см. Курс 3-5 ежедневных процедур.	

3	Глаукома	«Б-комп»	1) 4 мин. на закрытый глаз; 2) 4 мин. на открытый глаз; 3) 4 мин. на моргающий глаз 2 раза в день. В. зорор 3-5 см. Курс 7-10 ежедневных процедур.	<p>Перед сеансом снять контактные линзы.</p> <p>После процедуры закапать назначенные врачом глазные капли.</p> <p>Обработка слизистой глаза Окси - спреем 3 раза в день.</p>
		«Б-про»	1) 4 мин. на закрытый глаз; 2) 4 мин. на открытый глаз; 3) 4 мин. на моргающий глаз 2 раза в день. В. зорор 10 см. Курс 7-10 ежедневных процедур.	
		«Б-2»	1) 4 мин. на закрытый глаз; 2) 4 мин. на открытый глаз; 3) 4 мин. на моргающий глаз 2 раза в день. В. зорор 15 см. Курс 7-10 ежедневных процедур.	
4	Конъюктивит острый, включая аллергический	«Б-комп»	4-6 мин. на конъюктиву глаза 1-2 раза в день. В. зорор 3-5 см. Курс 3-4 ежедневные процедуры.	<p>Перед сеансом снять контактные линзы.</p> <p>После процедуры закапать назначенные глазные капли.</p> <p>Обработка слизистой глаза Окси - спреем 3 раза в день.</p>
		«Б-про»	4-6 мин. на конъюктиву глаз 1-2 раза в день. В. зорор 10 см. Курс 3-4 ежедневные процедуры.	
		«Б-2»	4-6 мин. на конъюктиву глаз 1-2 раза в день. В. зорор 15 см. Курс 3-4 ежедневные процедуры.	

Акушерство и гинекология

Нозология		Тип прибора «Биоптрон»	Методика применения	Примечание
1	Аднексит острый, хронический	«Б-комп»	По 6 мин. на зоны проекции придатков справа и слева 2 раза в день. В. зазор 3-5 см. Курс 8-10 ежедневных процедур.	Обработка Окси - спреем слизистой влагалища в положении лежа на гинекологическом кресле под контролем зеркала до и после процедуры.
		«Б-про»	По 6 мин. на зоны проекции придатков справа и слева 2 раза в день. В. зазор 10 см Курс 8-10 ежедневных процедур.	
		«Б-2»	6 мин. на нижнюю зону живота. В. зазор 15 см. Курс 8-10 ежедневных процедур.	
2	Альгоменор- рея, альго- дисменоррея	«Б-комп»	6-8 мин. на зону проекции матки 1-2 раза в день. В. зазор 3-5 см. Курс индивидуальный.	Обработка Окси - спреем зоны проекции матки до и после процедуры. Проводить лечение за 5 дней до начала менструаций
		«Б-про»	6-8 мин. на зону проекции матки 1-2 раза в день. В. зазор 10 см. Курс индивидуальный.	
		«Б-2»	6-8 мин. на зону проекции матки 1-2 раза в день. В. зазор 15 см. Курс индивидуальный.	

3	Кольпит острый, хронический, включая дрожжевой	«Б-комп»	6 мин. непосредственно на зону эрозии 3-4 раза в день. В. зазор 3-5 см. Курс 2-3 ежедневные процедуры.	Обработка Окси - спреем слизистой влагалища и шейки матки в положении лежа на гинекологическом кресле под контролем зеркала до и после процедуры.
		«Б-про»	6 мин. на зону промежности 3-4 раза в день. В. зазор 10см. Курс 2-3 ежедневные процедуры.	
		«Б-2»	6 мин. на зону промежности 3-4 раза в день. В зазор 15 см. Курс 2-3 ежедневные процедуры.	
4	Кондиломы, крауроз	«Б-комп»	6-8 мин. на область патологического очага 2 раза в день. В. зазор 3-5 см. Курс 7-10 ежедневных процедур.	Обработка Окси - спреем области промежности до и после процедуры.
		«Б-про»	6-8 мин. на область промежности 2 раза в день. В. зазор 10 см. Курс 7-10 ежедневных процедур.	
		«Б-2»	6-8 мин. на область промежности 2 раза в день. В. зазор 15 см. Курс 7-10 ежедневных процедур.	

5	Эрозия шейки матки	«Б-комп»	1) 6-8 мин. непосредственно на область эрозии; 2) 6 мин. на область солнечного сплетения 1-2 раза в день. В. зазор 3-5 см. Курс 10 ежедневных процедур.	<p>Обработка Окси - спреем слизистой влагалища и шейки матки в положении лежа на гинекологическом кресле под контролем зеркала до и после процедуры.</p> <p>Повторный курс через 10 дней - до 10 процедур 1 раз в день.</p>
		«Б-про»	1) 6-8 мин. на область промежности; 2) 6 мин. на область солнечного сплетения 1-2 раза в день. В. зазор 10 см. Курс 10 ежедневных процедур.	
		«Б-2»	1) 6-8 мин. на область промежности; 2) 6 мин. на область солнечного сплетения. 1-2 раза в день В. зазор 15 см. Курс 10 ежедневных процедур.	
6	Послеоперационный период (лапароскопические вмешательства по поводу внематочной беременности и др.)	«Б-комп»	1) по 4 мин. на зоны проекции обеих придатков; 2) 6 мин. на зону ромба Михаэлиса; 1-2 раза в день. В. зазор 3-5 см. Курс 10 ежедневных процедур.	<p>Обработка Окси - спреем облучаемых зон до и после процедуры.</p>
		«Б-про»	1) по 4 мин. на зоны проекции обеих придатков; 2) 6 мин. на зону ромба Михаэлиса; 1-2 раза в день. В. зазор 10 см. Курс 10 ежедневных процедур.	
		«Б-2»	1) по 4 мин. на зоны проекции обеих придатков; 2) 6 мин. на зону ромба Михаэлиса; 1-2 раза в день В. зазор 15 см. Курс 10 ежедневных процедур.	

7	Эндометриоз внутренний	«Б-комп»	<p>1) по 6 мин. на зону проекции придатков с обеих сторон и матки;</p> <p>2) 6 мин. на зону ромба Михаэлиса;</p> <p>3) 6 мин. на зону проекции солнечного сплетения</p> <p>1 раз в день.</p> <p>В. зазор 3-5 см.</p> <p>Курс 20 ежедневных процедур.</p>	<p>Обработка Окси - спреем облучаемых зон до и после процедуры.</p>
		«Б-про»	<p>1) по 6 мин. на зону проекции придатков с обеих сторон и матки;</p> <p>2) 6 мин. на зону ромба Михаэлиса;</p> <p>3) 6 мин. на зону проекции солнечного сплетения</p> <p>1 раз в день.</p> <p>В. зазор 10 см.</p> <p>Курс 20 ежедневных процедур.</p>	
		«Б-2»	<p>1) 6 мин. на зону проекции придатков с обеих сторон и матки;</p> <p>2) 6 мин. на зону ромба Михаэлиса;</p> <p>3) 6 мин. на проекцию солнечного сплетения</p> <p>1 раз в день.</p> <p>В. зазор 15 см.</p> <p>Курс 20 ежедневных процедур.</p>	

8	Дисфункция яичников репродуктивного и предменструального периода	«Б-комп»	1) по 4 мин. на зоны проекции обоих придатков; 2) 6 мин. на зону ромба Михаэлиса; 1 раз в день В. зазор 3-5 см. Курс индивидуальный.	Обработка Окси - спреем облучаемых зон до и после процедуры.
		«Б-про»	1) по 4 мин. на зоны проекции обоих придатков; 2) 6 мин. на зону ромба Михаэлиса; 1 раз в день. В. зазор 10 см. Курс индивидуальный.	
		«Б-2»	1) по 4 мин. на зоны проекции обоих придатков; 2) 6 мин. на зону ромба Михаэлиса; 1 раз в день. В. зазор 15 см. Курс индивидуальный.	
9	Фригидность	«Б-комп»	1) 4 мин. на зону проекции 3 и 4 поясничных позвонков; 2) 4 мин. на зону копчиковой области; 3) 4 мин. на зону клитора 1 раз в день. В. зазор 3-5 см. Курс индивидуальный.	Обработка Окси - спреем облучаемых зон до и после процедуры.
		«Б-про»	1) 4 мин. на зону проекции 3 и 4 поясничных позвонков и копчиковой области; 2) 4 мин. на область промежности 1 раз в день. В. зазор 10 см. Курс индивидуальный.	
		«Б-2»	1) 4 мин. на зону проекции 3 и 4 поясничных позвонков и копчиковой области; 2) 4 мин. на область промежности. В. зазор 15 см. Курс индивидуальный.	

10	Апоплексия яичников (болевая форма)	«Б-комп»	1) по 4 мин. на зоны проекции обеих придатков; 2) 6 мин. на зону ромба Михаэлиса; 3) 6 мин. на область солнечного сплетения 1-2 раза в день. В. зазор 3-5 см. Курс 10 ежедневных процедур.	Обработка Окси - спреем облучаемых зон до и после процедуры.
		«Б-про»	1) по 4 мин. на зоны проекции обеих придатков; 2) 6 мин. на зону ромба Михаэлиса; 3) 6 мин. на область солнечного сплетения 1-2 раза в день. В. зазор 10 см. Курс 10 ежедневных процедур.	
		«Б-2»	1) по 4 мин. на зоны проекции обеих придатков; 2) 6 мин. на зону ромба Михаэлиса; 3) 6 мин. на область солнечного сплетения 1-2 раза в день В. зазор 15 см. Курс 10 ежедневных процедур.	

11	Лактостаз, мастит	«Б-комп»	По 4 мин. попеременно на область молочных желез до и после кормления грудью 5 раз в день. В. зазор 3-5 см. Курс 3-4 ежедневные процедуры.	Обработка Окси - спреем области молочных желез до и после процедуры.
		«Б-про»	По 4 мин. попеременно на область молочных желез до и после кормления грудью 5 раз в день. В. зазор 10 см. Курс 3-4 ежедневные процедуры.	
		«Б-2»	4-8 мин. на область молочных желез до и после кормления грудью 5 раз в день. В. зазор 15 см. Курс 3-4 ежедневные процедуры.	
12	Трещины сосков	«Б-комп»	4-6 мин. на патологический очаг 5 раз в день. В. зазор 3-5 см. Курс 3-4 ежедневные процедуры.	Обработка Окси - спреем проблемной зоны до и после процедуры.
		«Б-про»	4-6 мин. на область груди 5 раз в день. В. зазор 10 см. Курс 3-4 ежедневные процедуры.	
		«Б-2»	4-6 мин. на область груди 5 раз в день. В. зазор 15 см. Курс 3-4 ежедневные процедуры.	

13	Гипо- галактия	«Б-комп»	По 6-8 мин. попеременно на область молочных желез 2 раза в день. В. зазор 3-5 см. Курс 7-10 ежедневных процедур.	Обработка Окси - спреем области молочных желез до и после процедуры.
		«Б-про»	По 6-8 мин. попеременно на область молочных желез 2 раза в день. В. зазор 10 см. Курс 7-10 ежедневных процедур.	
		«Б-2»	6-8 мин. на область молочных желез 2 раза в день. В. зазор 15 см. Курс 7-10 ежедневных процедур.	
14	Перинео- томия	«Б-комп»	4-6 мин. на разрез промежности (2 поля) 1-2 раза в день. В. зазор 3-5 см. Курс 1-3 ежедневные процедуры.	Обработка Окси — спреем области разреза до и после процедуры.
		«Б-про»	4 мин. на область промежности 1-2 раза в день. В. зазор 10 см. Курс 1-3 ежедневные процедуры.	
		«Б-2»	По 4 мин. на область промежности 1-2 раза в день. В. зазор 15 см. Курс 1-3 ежедневные процедуры..	

СПИСОК ЗАБОЛЕВАНИЙ

Показания	Стр.
Абсцесс	3
Аденома простаты	36
Аденоиды	24
Аднексит	69
Акне (угревая сыпь)	3
Аллергодерматоз	5
Аллопеция очаговая	11
Альгоменоррея, дисменоррея	69
Альвеолит	63
Апоплексия яичников (болевая форма)	74
Астма бронхиальная	29,44
Атопический дерматит	4,43
Баланопостит	35
Бородавки	10
Бронхит	30,44
Бурсит	61
Варикозное расширение вен	51
Воспаление слюнных желез	63
Гайморит	24
Гематома	59
Геморрой	53
Герпес	7
Гингивит	64
Гипотония	28
Гипертония	28
Гипогалактия	76
Глоссалгия, глоссит	64
Глаукома	68
Гломерулонефрит	50
Головные боли	39
Гормональный криз	43
Депрессия	38
Дерматит	6
Деформирующий остеоартроз	33
Диабетическая гангрена	56
Дисбактериоз	47
Дискинезия желчевыводящих путей	47
Дисфункция яичников	73
Диффузионные фурункулезы	27
Зубная боль	65

Инсульт	37
Импотенция	36
Иммунодефицит	42
Ишиалгия	41
Инфильтрат	58
Келоиды	11,58
Кольпит	70
Кондиломы	70
Крауроз	70
Конъюнктивит	68
Крапивница	4
Лактостаз	75
Ларингит	19,25
Ломкость ногтей	12
Мастит	75
Мигрень (лицевая симпаталгия)	40
Миозит	40
Микоз стоп	9
Миопия	67
Морщины	16
Мышечные судороги	55
Мозоли инфицированные	51
Невралгия лицевого, тройничного нерва	39
Нейрогенная дисфункция мочевого пузыря	48
Общеукрепляющая методика	42
Ожоги	57
Ожоговая болезнь	45
Опрелость	46
Омфалит	46
Остеохондроз позвоночника, шейный	33,40
Обморок	38
Отит	23
Оталгия	20
ОРВИ	45,46,48
Папилломатоз гортани	26
Парадонтоз, парадонтит	65
Переломы	60
Периодонтит	66
Перинеотомия	76
Потница	46
Предоперационная подготовка	13, 57
Пролежни	59
Простатит	35
Профилактика ОРВИ	48

Профилактика старения	15
Преждевременное старение кожи	16
Псориаз	10
Послеоперационный период в гинекологии	71
Пяточная шпора	34
Раны	56
Расстройство сна	41
Растяжение связок	54,61
Ревматоидный артрит	31,32
Реабилитационные программы	13,14
Ринит	20,21
Ринофарингит	19
Розacea (розовые угри)	9
Рубцы	55,58
Себорейный дерматит	8
Синдром Рейно	32
Свищи	60
Склеродермия	32
Солнечная эритема	5
Ссадины	54
Стоматит	64
Стрии	17
Термоингаляционные травмы	62
Травмы	54
Традиционный уход за кожей	15
Тонзиллит, ангина	18,49
Трещины сосков	75
Тромбофлебит	52
Трофические язвы голени	52, 53
Ушибы	54
Укусы насекомых	12
Фолликулит	8
Фарингит	46
Фронтит	22
Фригидность	73
Фурункулез	3
Шум в ушах	22
Экзема	6
Эндометриоз	72
Энцефалопатия ДЦП	49
Эрозия шейки матки	71
Язвенная болезнь	34
Ячмень	67